

PP 5009 Chromogenic *Listeria* acc.to ISO 11290 LAB-AGAR™

Chromogenna, selektywna pożywka wybiórczo - różnicująca do izolacji *Listeria monocytogenes*.



Pożywka spełnia zalecenia normy: **ISO 11290-1** oraz **ISO 11290-2**.

Materiał pobrany posiać na pożywkę w taki sposób aby uzyskać wzrost pojedynczych kolonii.

Inkubacja w warunkach tlenowych w temperaturze $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$; czas 24 h.

Morfologia kolonii po 24 h inkubacji:

Listeria monocytogenes
kolonie niebieskozielone
ze otoczone strefą "halo"

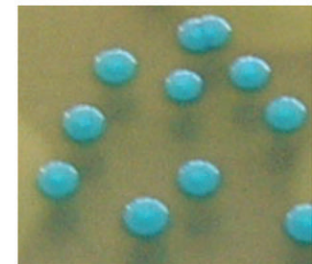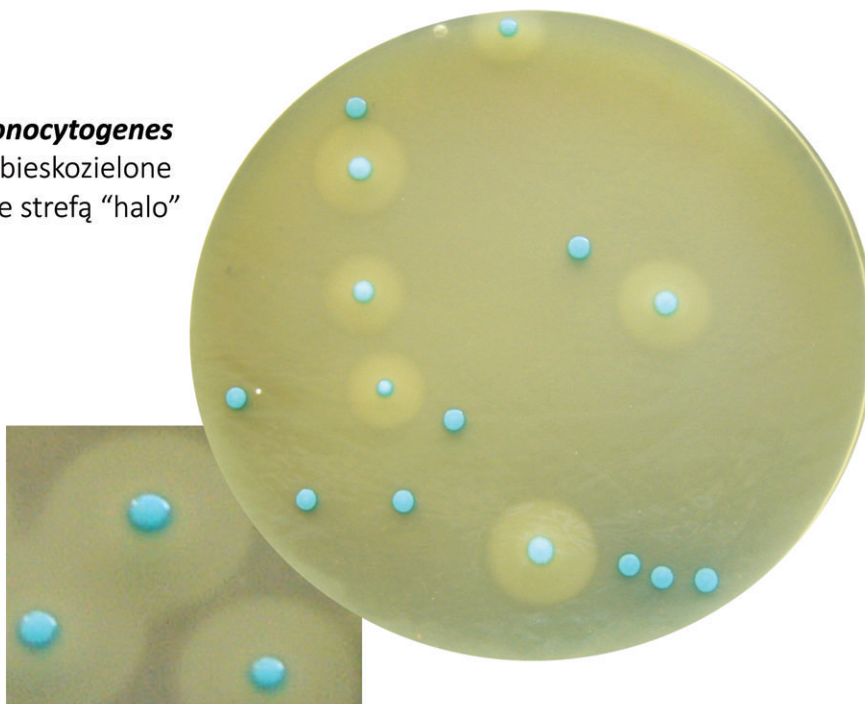

Listeria innocua
kolonie niebieskozielone
bez strefy "halo"

Warunki i termin przechowywania:

gotowe podłoże na płytkach przechowywać w temp. 2-12°C

zżyć przed upływem terminu ważności

Przeznaczenie:

produkt przeznaczony do profesjonalnego użycia w diagnostyce in vitro

Postępowanie z odpadami:

postępowanie z odpadami – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Postępowanie ze użytymi podłożami:

zużyte podłoża należy usuwać zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce procedurami



ver. 1 | IV 2014

BIOCORP Polska Sp. z o. o.

ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa, tel. + 48 22 668 73 80; fax. + 48 22 658 45 06

www.biocorp.pl, biuro@biocorp.pl