

STAPHYtest 24

nr kat. 10010223

WYGODNA IDENTYFIKACJA NAJWAŻNIEJSZYCH KLINICZNIE GATUNKÓW RODZAJU STAPHYLOCOCCUS

Zestaw STAPHYtest 24 jest przeznaczony w pierwszej kolejności do ostatecznej kierunkowej identyfikacji gatunków rodzaju Staphylococcus izolowanych z materiału klinicznego oraz ich różnicowania wobec pozostałych gram-dodatnich, katalazo-dodatnich ziarenkowców. Zestaw umożliwia przeprowadzenie czterdziestu badań z pomocą dwudziestu czterech testów biochemicznych oraz ocenę wizualną a także ocenę z pomocą aparatu. Standardowymi off-line testami zestawu są: przesiewowe potwierdzenie koagulazy oraz wzrostowe potwierdzenie oporności na nowobiocynę. Testy umiejscowione są w studzienkach potrójnego paska dzielonej płytki do mikromiareczkowania; jeden potrójny pasek służy do identyfikacji jednego szczepu. Identyfikację można uzupełnić, zgodnie z zaleceniami oprogramowania oceniającego, następującymi testami: VPtest, PYRAtest ewentualnie OXItest dostarczany w postaci pasków diagnostycznych

Zestaw zawiera 24 testy biochemiczne:

1		H URE	G ARG	F ORN	E bGA	D GLR	C bGL	B PHS	A ESL
	⊕	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	⊖	● ●	● ●	● ●	○	○	○	○	● ●
2		H NAG	G GAL	F SUC	E TRE	D MAN	C MLT	B XYL	A MNS
	⊕	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	⊖	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
3		H LAC	G SOR	F RIB	E FRU	D CEL	C ARA	B RAF	A XOL
	⊕	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
	⊖	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

dla bardziej szczegółowego wyrażenia barw dodatnich oraz ujemnych reakcji należy zastosować Porównawczą skalę barw do STAPHYtest 24

Zestaw zawiera :

- 10 paneli identyfikacyjnych (każdy do identyfikacji 4 szczepów) z wysuszaczem
- Instrukcję obsługi wraz z tabelą identyfikacyjną
- 10 PE torebek do inkubacji
- 40 formularzy do wpisywania wyników
- Ramkę płytki z pokrywą (z nadrukiem)

Zalety zestawu STAPHYtest 24:


- Niezawodna ostateczna identyfikacja do gatunku
- Ocena: wizualna i z pomocą czytnika
- Wygodny bezodczynnikowy zestaw
- Zminimalizowanie potrzeby wykonania dodatkowych testów

STAPHYtest 24 oraz dodatkowe akcesoria:

Nr kat.	Nazwa wyrobu	Ilość badań/op.	Ważność/ miesiące
10010223	STAPHYtest 24	40	12
10003329	VPtest	50	12
10003369	Odczynnik do testu ACETOINA	100	18
10003324	OXItest	50	12
10003375	Odczynnik do testu OXItest	500	12
10003344	PYRAtest	50	12
10003379	Odczynnik do testu PYR	500	12
10003371	Sterylizowany olej parafinowy	180	12
50001697	NOVOBIOCINA	100	12
50001518	BACITRACINA S	100	10
50003500	Porównawcza skala barw do STAPHYtest 24		
50003505	Książka kodów do STAPHYtest 24		

Lista taksonów:

Aerococcus viridans, *Dermaococcus nishinomiyaensis*, *Kocuria kristinae*, *Kocuria rosea*, *Kocuria varians*, *Macrocooccus bovicus*, *Macrocooccus caseolyticus*, *Macrocooccus carouelicus*, *Macrocooccus equipersicus*, *Micrococcus spp.*, *Rothia mucilaginosa*, *Staphylococcus arlettae*, *Staphylococcus aureus ssp. anaerobius*, *Staphylococcus aureus ssp. aureus*, *Staphylococcus auricularis*, *Staphylococcus capitis ssp. ureolyticus*, *Staphylococcus capitis ssp. capitis*, *Staphylococcus caprae*, *Staphylococcus carnosus ssp. carnosus*, *Staphylococcus carnosus ssp. utilis*, *Staphylococcus cohnii ssp. urealyticum*, *Staphylococcus cohnii ssp. cohnii*, *Staphylococcus condimenti*, *Staphylococcus delphini*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus equorum*, *Staphylococcus fellis*, *Staphylococcus gallinarum*, *Staphylococcus haemolyticus*, *Staphylococcus hominis ssp. novobiosepticus*, *Staphylococcus hominis ssp. hominis*, *Staphylococcus hyicus*, *Staphylococcus chromogenes*, *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus kloosii*, *Staphylococcus lentus*, *Staphylococcus lugdunensis*, *Staphylococcus lutrae*, *Staphylococcus muscae*, *Staphylococcus pasteurii*, *Staphylococcus piscifermentans*, *Staphylococcus saprophyticus ssp. saprophyticus*, *Staphylococcus saprophyticus ssp. bovis*, *Staphylococcus sciuri*, *Staphylococcus schleiferi ssp. coagulans*, *Staphylococcus schleiferi ssp. schleiferi*, *Staphylococcus simulans*, *Staphylococcus vitulinus*, *Staphylococcus warneri*, *Staphylococcus xylosus*

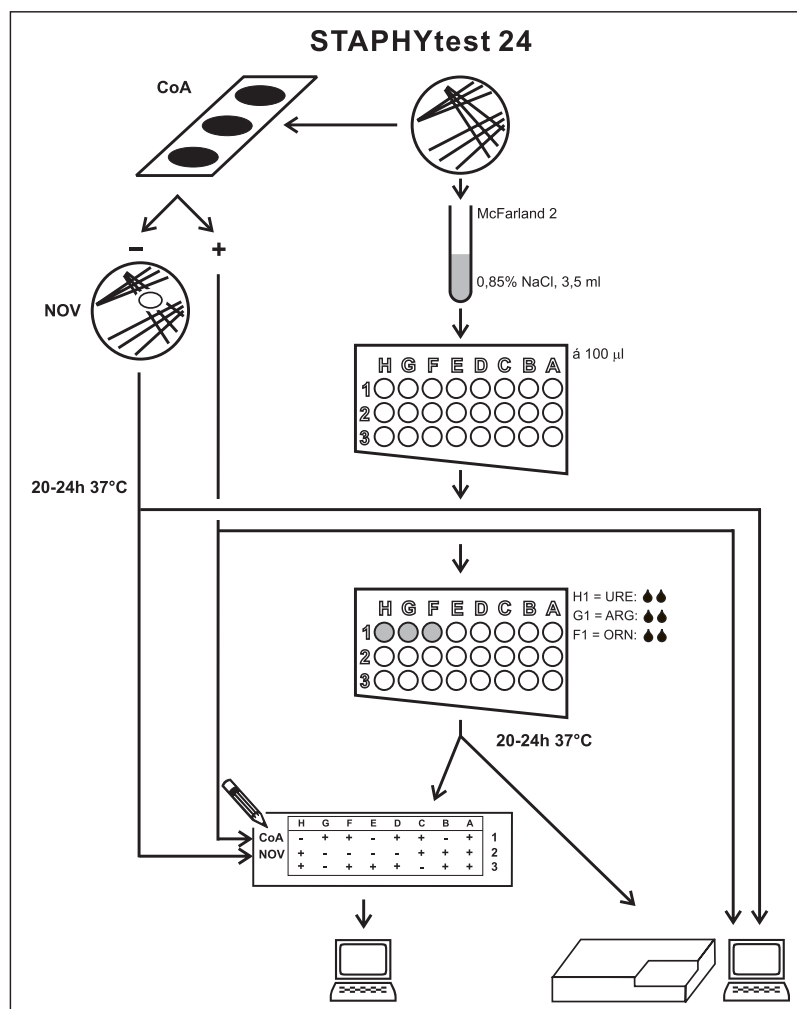

● = Parafinový olej - Paraffin oil - Пар.маcно - Olej parafinowy - Paraffinölaj - Paraffinöl - Aceite de parafina